





## BD PrecisionGlide™ Agulha Hipodérmica

Bisel trifacetado


### Instruções:

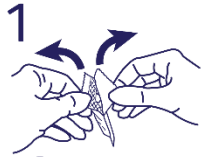

Abra pelas pétalas até aparecer o canhão.

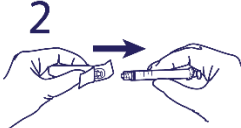

Para adaptar a agulha, encoste o bico da seringa no canhão exposto e gire em sentido horário.

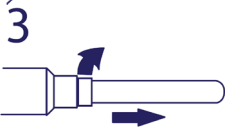

O protetor plástico serve para manter a agulha protegida até o uso. Retire-o com cuidado.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA:

**CUIDADO:** Para prevenir o HIV, HepB, HepC e outras doenças infecto-contagiosas através de acidentes com perfurantes e/ou cortantes:

A- Não recoloca o protetor em agulhas usadas. Descarte seringas com agulhas sem protetores em coletores apropriados, de paredes rígidas.

B- Caso isto não seja possível, recoloca o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor.

C- Siga as recomendações de seu local de trabalho com relação à prevenção de acidentes com perfurantes e/ou cortantes.

D- Siga as recomendações do Ministério da Saúde.

Não recoloca o protetor em agulhas usadas



Descarte no coletor de perfurantes e/ou cortantes BD Descartex™

**Atenção:** Não reutilizar. A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão.

Verificar a integridade da embalagem primária antes da utilização.

Apirogênico - Atóxico



Estéril. Esterilizado a óxido de etileno

Produto não é feito com látex de borracha natural

Produto de uso único - Descartar após o uso – Proibido reprocessar

Armazenar em local seco e limpo - Transportar na embalagem original

**Fabricante:**

Becton Dickinson Indústria Cirúrgicas Ltda.

Rua Cyro C. Pereira, 550 Curitiba - PR

Indústria Brasileira

CNPJ 21.551.379/0013-31

Responsável Técnico: Luciana M. Pauka - CRF-PR12541

SAC- Serviços de Atendimento ao Cliente: 0800-0555654 / [cs\\_brasil@bd.com](mailto:cs_brasil@bd.com)

Registro ANVISA nº: 10033430019