

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

1. **Produto:** Agulha Hipodérmica Estéril de Uso Único.
2. **Registro MS:** 80026180009
3. **Instruções de uso.**
 - a) Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
 - b) Destacar a unidade do produto da cartela;
 - c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação;
 - d) Retirar a agulha da embalagem pegando pelo protetor;
 - e) Conectar a agulha na seringa do Bico SLIP e realizar o movimento de rotação 180° (½ volta), e no Bico LOCK rosquear até que a agulha esteja fixa;
 - f) Retirar o protetor da agulha;
 - g) Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
 - h) Após o procedimento retirar a agulha do bico da seringa Bico SLIP realizando rotação de 180° (½ volta) sentido contrário, e no Bico LOCK desenroscar a agulha (É recomendável retirar a agulha sempre com um dispositivo, como o epiflex, para evitar acidentes);
 - i) Após o uso descartar em local adequado para perfuro cortantes.
4. **Fabricante.**

SALDANHA RODRIGUES LTDA	
Avenida Torquato Tapajós, nº 2475 – Bairro Flores	CEP: 69.058-830
CNPJ: 03.426.484/0001-23	Inscrição Estadual: 06.200.183-3
Inscrição SUFRAMA: 20068301-2	
E-mail: vendas@seringasr.com.br	
Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br	