

|   |                 |   |                            |   |
|---|-----------------|---|----------------------------|---|
| <br>PRODUTOS PARA SAÚDE | Revisão<br>n°03 | <b>INSTRUÇÃO DE USO - Sonda<br/>NASOGÁSTRICA<br/>IU 5.003</b> | Emissão:<br><b>07/2021</b> | <br>PRODUTOS PARA SAÚDE |
|---|-----------------|---|----------------------------|---|

### **Especificação Técnica:**

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

#### **Sonda Nasogástrica Curta:**

Calibres: 04 ao 24 FR;

Comprimento: 40 cm;

4 orifícios laterais alternados, ponta fechada.

#### **Sonda Nasogástrica Longa:**

Calibres: 04 e 24 FR;

Comprimento: 110 cm;

4 orifícios laterais alternados, ponta aberta;

Exceção: Calibre 4FR possui a ponta fechada.

### **Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

### **Advertências e Precauções:**

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida;

O conector deve assegurar compatibilidade com equipos de nutrição e seringas.

### **Indicação de Uso:**

Quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo, usada para administrar medicamentos e alimentos diretamente no trato gastrointestinal; e para fazer lavagens gástricas. É introduzida através da boca ou nariz até o estômago ou intestino. As sondas nasogástricas curtas são as sondas introduzidas até o estômago, e as nasogástricas longas são introduzidas até o trato intestinal. São conectadas a um equipo de nutrição, o qual é conectado ao frasco de alimentação ou as sondas podem ser conectadas a uma seringa. O tempo máximo de permanência das sondas é de 7 dias.

### **Contraindicação:**

Contraindicado tempo de permanência das sondas superior a 7 dias.

### **Modo de Uso:**

Abrir a embalagem utilizando a técnica asséptica durante o manuseio, introduzir a sonda conforme técnicas médicas até o ponto do esparadrapo, dobrar a extremidade da sonda antes de adaptar a seringa ou equipo. Conectar a sonda no equipo ou seringa e por ela introduzir o alimento vagarosamente, evitando que se esvazie, para evitar a entrada de ar. Após a dieta, lavar a sonda com 20ml de água, a fim de remover as partículas que nela ficarem aderidas. Fechar a sonda.

Descartar o produto após o uso de acordo com a legislação vigente.

|   |                         |   |                             |   |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| <br>PRODUTOS PARA SAÚDE | <b>Revisão<br/>n°03</b> | <b>INSTRUÇÃO DE USO - Sonda<br/>NASOGÁSTRICA<br/>IU 5.003</b> | <b>Emissão:<br/>07/2021</b> | <br>PRODUTOS PARA SAÚDE |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570003.