

MAX INJETOR LUER

INSTRUÇÕES DE USO

Fabricado e Distribuído por:

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.
Rua Renato Coelho, 99, Centro – Itapira (SP) –
Brasil
CEP 13970-040 – CNPJ: 07.499.258/0001-23

Resp. Téc.: Maristela Pereira de Moraes –CRF/SP
37518
Autorização de Funcionamento:
G2Y6W9H0WM2M
www.mphospitalar.com.br

Nome Técnico: Conectores e Conexão

Nome Comercial e Marca: MAX INJETOR LUER

Modelo Comercial: MAX INJETOR LUER

PRODUTO DE USO ÚNICO · PROIBIDO REPROCESSAR · PRODUTO ESTÉRIL

Responsável Técnico: Maristela Pereira de Moraes CRF/SP 37518

Registro ANVISA nº: **80305560079**

Serviço de Atendimento ao Consumidor: www.mphospitalar.com.br/atendimento (19) 3813-2400

1.INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO DO PRODUTO

O Conector injetor luer é um dispositivo para adaptação nos dispositivos de infusão para retenção e adição de medicamentos. O produto garante a estanqueidade após perfuração de agulhas, através do disco cicatrizante.

2.ACESSÓRIOS

- tampa luer

3.Instruções de uso

1-Fazer a assepsia da extremidade do dispositivo intravenoso.

2-Atarrachar a luva ao dispositivo intravenoso.

3-Introduzir a agulha da seringa no disco.

Descarte: os produtos médicos descritos nessa instrução de uso, que forem removidos de seus pacientes, devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar. Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização.

4.PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E RESTRIÇÕES DE USO (CONTRA-INDICAÇÕES)

Evite que a embalagem entre em contato com produtos líquidos de qualquer espécie, impedindo assim a danificação da mesma e conseqüente contaminação do produto. Evite que o produto, antes de ser utilizado seja manuseado e/ou estocado perto de objetos perfurocortantes. Siga rigorosamente as orientações de assepsia da CCIH.

Manter na embalagem original até o momento do uso.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.

Contra-indicações: não existem contra-indicações.

Validade: 3 anos. A vida útil será plena, se todas as instruções, precauções e advertências, relativas ao transporte, armazenagem e manuseio do produto, contidas neste documento, forem respeitadas e rigorosamente seguidas.

5. CUIDADOS ESPECIAIS

Utilizar o produto de forma asséptica, somente se a embalagem primária estiver íntegra, garantindo a esterilidade do produto. A embalagem primária deve ser aberta apenas no momento de uso do acessório.

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Cada modelo de conector é fornecido em embalagem selada (sistema de termoselagem) individual, tipo blister, com uma face de PGC – Papel Grau Cirúrgico e outra face de filme plástico de polietileno.

7. EMBALAGEM

Posteriormente são embaladas dentro de caixa de papelão resistente ao transporte.

8. ESTERILIZAÇÃO

Os componentes são esterilizados por óxido de etileno. Devem inspecionar-se as embalagens de todos os produtos esterilizados para ver se apresentam defeitos na barreira asséptica antes da sua abertura. No caso da existência de um defeito deste tipo, deve considerar-se que o produto não está esterilizado. Deve proceder-se com cuidado para impedir a contaminação do componente. Em caso de contaminação, deverá eliminar-se este produto.

9. RASTREABILIDADE

A rastreabilidade é feita através do número de lote que se encontra no rótulo de cada caixa e que é também colocado no Documento de Venda, o que permitirá um perfeito controle do material utilizado.

10. CUIDADOS ESPECIAIS DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DO PRODUTO

Armazenagem: Deve ser mantida a temperatura ambiente e em local fresco e seco. No armazenamento deve ser observado o empilhamento máximo indicado na embalagem comercial.

Transporte: No transporte deve ser observado o empilhamento máximo indicado na embalagem comercial. No transporte deve-se garantir a perfeita integridade da embalagem.

Casos de dano da embalagem: NÃO UTILIZAR O PRODUTO.

11. PARTES E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: Não se aplica



PRODUTO DE USO ÚNICO

O produto pode ser utilizado apenas uma vez em um único paciente. A limpeza e reesterilização são proibidas. A reutilização deste produto oferece riscos potenciais ao paciente e ao usuário. O comprometimento das propriedades dos materiais e a esterilidade inadequada associada a reutilização podem causar danos, doença ou morte do paciente.



CONTÉM FTALATO (DEHP)

O produto contém o plastificante DEHP. O DEHP foi classificado como teratogênico em estudos com animais. O produto deve ser utilizado com precaução em mulheres grávidas ou lactantes, lactentes e crianças. Cabe ao médico a decisão de uso do produto nestes pacientes, observando se o benefício de sua utilização supera o risco.



Nº do lote
Validade



Data de Fabricação



Data de



Método de esterilização: Óxido de Etileno
Instruções de Uso



Produto de uso único



Ver