



**MODELO DE ROTULAGEM
EMBALAGEM PRIMÁRIA
BD ULTRA-FINE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA**

Contém: 10 unidades.

Seringa ___ unidades ou menos (___ mL)

Agulha ___ mm - Comprimento (___")

___ mm - Calibre (___ G)

Indicação de Uso: Seringa com agulha Ultra-Fine para aplicação de insulina

Instruções de Uso:

- 1. Para expor o êmbolo:** gire a tampa branca, quebrando o selo de segurança e puxe-a.
- 2. Para expor a agulha:** gire a tampa cor de laranja, quebrando o selo de segurança. Puxe-a de uma só vez, tomando cuidado para não danificar a agulha.
- 3. Para medir a dose corretamente:** encoste o êmbolo no fundo da seringa. Puxe o êmbolo levando-o até a dosagem desejada, localizando-o na escala gravada no corpo da seringa.
- 4. Use a seringa apenas uma vez.** Para evitar sua reutilização indevida descarte a seringa e agulha após a aplicação.

Cuidado: Siga essas instruções a fim de evitar erros nas dosagens.

Advertências:

Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

Produto estéril. Esterilizado a Cobalto 60.

Não tóxico e não pirogênico.

Sem látex.

A esterilidade desta seringa é garantida até que os protetores das extremidades sejam removidos ou danificados.

Válido por 5 anos desde a data de fabricação.

Escala de ___ em ___ unidades – cada traço representa ___ unidades

Insulina U-100

Precauções:

Para os pacientes que misturam dois tipos de insulina é recomendável:

- Não alterar a ordem da mistura prescrita pelo médico;
- Não mudar para outro tipo e marca de seringa sem antes consultar o médico ou o farmacêutico.



Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937

bd.com

Interior da seringa estéril. Verifique a integridade dos protetores da seringa antes do uso.

Importante: Exija esta embalagem fechada.

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.

Fabricante:

Becton Dickinson and Company
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417
Estados Unidos da América

Feito nos Estados Unidos da América

Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 273, Francisco Bernardino.
Juiz de Fora, MG.
CNPJ 21.551.379/0001-06

SAC Brasil: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com / www.bd.com

Centro BD de Educação em Diabetes: 0800 011 5097 / www.bdbomdia.com

Responsável técnico: Marcelo A. Lopes. CRF-MG 13673.

Registro ANVISA: 10033430026

FAB:

VAL:

LOTE:

**MODELO DE ROTULAGEM
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
BD ULTRA-FINE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA**

Contém: 100 unidades (embalagens com 10 unidades).

Seringa ___ unidades ou menos (___ mL)

Agulha ___ mm - Comprimento (___")

___ mm - Calibre (___ G)

Cuidados, precauções e advertências: vide instruções de uso.

Interior da seringa estéril.

Protetores da agulha e do êmbolo garantem esterilidade até serem removidos.

Verifique a integridade dos protetores da seringa antes do uso.

Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

Produto Estéril. Esterilizado a Cobalto 60.

Não tóxico e não pirogênico. Sem látex.

Insulina U-100

Armazenar em temperatura ambiente.

Fabricante:

Becton Dickinson and Company

1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417

Estados Unidos da América

Feito nos Estados Unidos da América

Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 273, Francisco Bernardino.

Juiz de Fora, MG.

CNPJ 21.551.379/0001-06

SAC Brasil: 08000555654 ou cs_brasil@bd.com / www.bd.com

Centro BD de Educação em Diabetes: 0800 011 5097 / www.bdbomdia.com

Responsável técnico: Marcelo A. Lopes. CRF-MG 13673.

Registro ANVISA: 10033430026

FAB:

VAL:

LOTE:



Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937

bd.com

**MODELO DE ROTULAGEM
EMBALAGEM TERCIÁRIA
BD ULTRA-FINE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA**

Contém: 5 caixas com 100 seringas.
Seringa ___ unidades ou menos (___ mL)
Agulha ___ mm - Comprimento (___")
___ mm - Calibre (___ G)

Produto estéril. Esterilizado a Cobalto 60.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.
Manuseie com cuidado.
Não tóxico e não pirogênico.
Sem látex.
Insulina U-100

Armazenar em temperatura ambiente.

Fabricante:

Becton Dickinson and Company
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417
Estados Unidos da América

Feito nos Estados Unidos da América

Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 273, Francisco Bernardino.
Juiz de Fora, MG.
CNPJ 21.551.379/0001-06
SAC Brasil: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com / www.bd.com
Centro BD de Educação em Diabetes: 0800 011 5097 / www.bdbomdia.com
Responsável técnico: Marcelo A. Lopes. CRF-MG 13673
Registro ANVISA: 10033430026

FAB:

VAL:

LOTE: