



## ÁCIDO POLIGLICÓLICO

**Descrição** - Os fios cirúrgicos de Ácido Poliglicólico são de origem sintética, fabricados com fio absorvível multifilamentar, de ácido poliglicólico coberto por policaprolactona e estearato de cálcio, possui alta resistência e excelente manuseio. Estudos demonstram que a absorção é essencialmente completa entre 60 e 90 dias. Perde 50% da resistência tênsil em 14 dias. Esterilizado por Óxido de Etileno.

**Indicações** - Aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos ginecológicos, obstétricos, ortopédicos, urológicos, gastrointestinais e fechamento geral.

**Contraindicações** - São contraindicados em cirurgias cardiovasculares e neurológicas e procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas ou que exijam extensa tensão para a aproximação dos tecidos.

**Apresentações** - Apresenta-se na coloração Violeta, com os números cirúrgicos de 10-0 a 2 (vide tabela de preços), providos ou não de agulhas.

**Descrição** - Os fios cirúrgicos de Ácido Poliglicólico são de origem sintética, fabricados com fio absorvível multifilamentar, de ácido poliglicólico coberto por policaprolactona e estearato de cálcio, possui alta resistência e excelente manuseio. Estudos demonstram que a absorção é essencialmente completa entre 60 e 90 dias. Perde 50% da resistência tênsil em 14 dias. Esterilizado por Óxido de Etileno.

**Indicações** - Aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos ginecológicos, obstétricos, ortopédicos, urológicos, gastrointestinais e fechamento geral.

**Contraindicações** - São contraindicados em cirurgias cardiovasculares e neurológicas e procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas ou que exijam extensa tensão para a aproximação dos tecidos.

**Apresentações** - Apresenta-se na coloração Violeta, com os números cirúrgicos de 10-0 a 2 (vide tabela de preços), providos ou não de agulhas.

**Instruções de Uso** - Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

**Cuidados** - Este produto deve ser utilizado por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas. Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material. Usar técnicas assépticas. Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada. Produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único. O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina. Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada. Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida. O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico. PROIBIDO REPROCESSAR. A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado.

**Conservação** - Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

**Validade** - A sutura de Ácido Poliglicólico tem validade de 3 (três) anos após a data de fabricação.

**CAIXA COM 12, 24 E/OU 36 ENVELOPES - PRODUTO DE USO ÚNICO - NÃO REESTERILIZAR - ESTÉRIL - DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ETO.**

### SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓGENES. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA CEP 76100-000 - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO.

Farmacêutica Responsável: DRª KÁTIA REGINA DO NASCIMENTO DIAS POLICARPO CRF-GO 11.307

VENDAS - AV. C-255 Nº 270, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SEBBA, SALAS: 602/603 NOVA SUÍÇA - GOIÂNIA - GO - CEP: 74280-010. SAC.: (62)3259-4546. E-MAIL: vendas@sutura.com.br.  
CNPJ: 33.348.467/0001-86 - Indústria Brasileira.  
Registro no Ministério da Saúde: Nº 10243410025