



POLIPROPILENO

Descrição - Os fios cirúrgicos de Polipropileno são de origem sintética, fabricados a partir da extrusão do polímero de polipropileno. É um material biologicamente compatível, bem tolerado pelo organismo, monofilamentar, de alta resistência tênsil e fácil manuseio. Não sujeito à degradação ou enfraquecimento pela ação de enzimas teciduais. Reação inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicações - Aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, gastrointestinais, cuticulares, ginecológicos e obstétricos.

Contraindicações - São contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.

Apresentações - Apresenta-se na coloração azul, com os números cirúrgicos de 7-0 a 2 (vide tabela de preços), providos ou não de agulhas.

Instruções de Uso - Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

Cuidados - Este produto deve ser utilizado por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas. Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material. Usar técnicas assépticas. Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada. Produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único. O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina. Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada. Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida. O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico. PROIBIDO REPROCESSAR. A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado.

Conservação - Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

Validade - A sutura de Polipropileno tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.

CAIXA COM 12, 24 E/OU 36 ENVELOPES - PRODUTO DE USO ÚNICO - NÃO RE-ESTERILIZAR - ESTÉRIL - DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ETO.

SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓGENES. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA CEP 76100-000 - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – GO.

Farmacêutica Responsável: DR^a KÁTIA REGINA DO NASCIMENTO DIAS POLICARPO - CRF-GO 11.307

VENDAS - AV. C-255 Nº 270, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SEBBA, SALAS: 602/603 NOVA SUIÇA - GOIÂNIA – GO - CEP: 74280-010. SAC.: (62)3259-4546. E-MAIL: vendas@sutura.com.br.
CNPJ: 33.348.467/0001-86 – Indústria Brasileira.

Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410014