

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão nº02	INSTRUÇÃO DE USO SONDA URETRAL IU 5.001	Emissão: 07/2021	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	----------------------------	---

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Tamanhos nos calibres: 04 ao 24 FR.

Comprimento: 40 cm.

2 orifícios laterais, ponta fechada.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de uso único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso das sondas devem ser feitas pelo médico.

Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria a ser utilizada.

Verificar o prazo de validade do produto antes de sua utilização. Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida.

Indicação de Uso:

A Sonda Uretral é utilizada para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (uso transitório), tem como finalidade preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine de forma espontânea, após certas cirurgias; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e a instrução de uso.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio, introduzir a sonda conforme técnicas médicas na bexiga, através do orifício externo da uretra e, esperar escoar a urina dentro da cuba rim e retirar a sonda conforme técnica.

Após o uso do produto descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 Cep 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570001.