

NOME DO PRODUTO AGULHA TUOHY EPIDURAL UNIEVER UNISIS

Registro MS:10150470184 **estilete Inox**

Registro MS:10150470269 **estilete plástico**

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulha Tuohy epidural

Matéria Prima: Aço Inox + Policarbonato

Estilete em Aço Inox ou Plástico

Método de Esterilização: ÓXIDO DE ETILENO

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

As agulhas epidurais TUOHY - UNISIS, possuem ponta curva em 45°. Conector Luer Lock transparente para melhor visualização da infusão do medicamento.

Seu design anatômico favorece maior firmeza na punção.

A agulha pode também ser oferecida com asa removível. Esta é fixada em dispositivo específico no conector.

A profundidade de inserção da agulha é indicada pela graduação na agulha com 10 mm de distância. Esta é facilmente visualizada.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para uso em cirurgias onde é realizada injeção de anestésico local no espaço epidural

INSTRUÇÃO DE USO

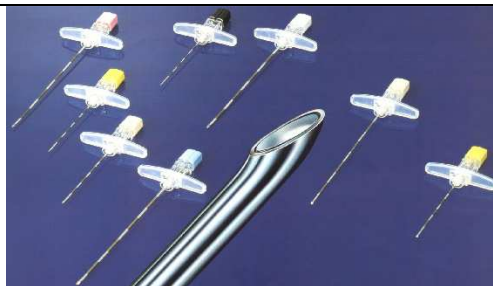
- Utilizar técnica atualmente aceita.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A Agulha Tuohy Epidural Descartável Uniever Unisis é um produto constituído por cânula em aço inoxidável com ponta arredondada e bisel com 45° o suficientemente cortante, que permite um perfeito posicionamento no espaço epidural e uma penetração suave com menor risco de trauma

A parede da cânula é suficientemente fina e com formato tal, que garante um maior diâmetro interno para a passagem de um cateter epidural de maior calibre com mínimo trauma.

Um leve desvio angular entre a faceta do estilete e o bisel da agulha minimiza os riscos da centralização da punção, o que também dá o necessário "Felling" para confirmar o posicionamento da ponta da agulha no espaço epidural.

FOTO**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

- **ESTILETE EM AÇO INOX:**

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMP.	ESPECIFICAÇÃO	COR CANHÃO	INDICAÇÃO
T168	16G	3"	80X16	AZUL CLARO	
T169	16G	3 ½"	90X16	AZUL CLARO	
T1611	16G	4 ¼"	110X16	AZUL CLARO	OBESO
T179	17G	3 ½"	90X15	BRANCA	
T1712	17G	4 ¾"	120X15	BRANCA	OBESO
T188	18G	3"	80X12	ROSA	
T185	18G	2"	50X12	ROSA	PEDIATRIA
T189	18G	3 ½"	90X12	ROSA	
T1811	18G	4 ¼"	110X12	ROSA	OBESO
T1813	18G	5"	130X18	ROSA	OBESO
T1815	18G	6"	150X18	ROSA	OBESO
T198	19G	3"	80X10	MARFIM	
T199	19G	3"	90X10	MARFIM	
T205	20G	2"	50X09	AMARELA	PEDIATRIA
T209	20G	3 ½"	90X09	AMARELA	
T225	22G	2"	50X07	PRETA	PEDIATRIA

- **ESTILETE PLÁSTICO:**

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMP.	ESPECIFICAÇÃO	COR CANHÃO	INDICAÇÃO
T168P	16G	3"	80X16	AZUL CLARO	
T169P	16G	3 ½"	90X16	AZUL CLARO	
T179P	17G	3 ½"	90X15	BRANCA	
T185P	18G	2"	50X12	ROSA	PEDIATRIA
T188P	18G	3"	80X12	ROSA	
T189P	18G	3 ½"	90X12	ROSA	

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

As agulhas são embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser conservada e transportada e sua embalagem original até o momento de sua utilização, em ambiente seco e arejado.

Cuidar para que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso, a fim de manter sua esterilidade

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Retirar assepticamente de sua embalagem original, em ambiente estéril.

Se o cateter não puder ser introduzido suavemente, descontinue o uso.

Se a conexão da seringa com o conector da agulha não for bem-feita pode causar vazamento de fluidos, descontinuar o uso.

Não use força excessiva para avançar a agulha.

Não deve ser reutilizada ou reesterilizada.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259