

**Cadastro / Registro M.S.:**

10369460222

**Modelos Cadastrados:**

10, 11, 12, 12b, 15 e 15c, 20, 21, 22, 23 e 24

**Indicação de Uso:**

As lâminas de Bisturi Solidor são utilizadas para cortar tecidos celulares, principalmente em cirurgias e procedimentos cirúrgicos.

**Instrução de Uso:**

As lâminas para bisturi devem ser utilizadas seguindo-se a técnica cirúrgica adequada e selecionada pelo cirurgião responsável.

1. As lâminas são montadas em um cabo de bisturi, podendo ser o cabo de número 3 ou 4.
2. Utilize a lâmina de acordo com as especificações dos cabos de bisturi:
  - 10,11,12 e 15 para cabo de bisturi n.º 3;
  - 20,21,22,23 e 24 para cabo de bisturi n.º 4;
3. Para fazer o encaixe da lâmina no cabo utilize uma pinça cirúrgica. Coloque a parte vazada da lâmina, encaixando-a na ponta do cabo de bisturi. Este procedimento deverá ser realizado com técnicas estéreis.
4. Para descartar a lâmina, é recomendado a utilização de uma pinça de Kelly. Fechando a pinça na parte superior da lâmina, puxe a lâmina do cabo desencaixando-a do cabo.

**Conservação, Armazenamento e Transporte:**

- Armazenar em local seco, limpo e livre dos raios solares.
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas.

**Advertência/Precaução:**

- Não reesterilize a lâmina.
- Em hipótese alguma utilize a lâmina, caso a mesma tenha sido contaminada.
- Ao manipular a lâmina, utilize técnicas e instrumentais adequados e assépticos.
- O procedimento de colocação e retirada da lâmina no cabo de bisturi deve ser feito com muita atenção para evitar que o usuário se corte.
- Nunca esterilizar o cabo do bisturi com a lâmina acoplada.
- Ao descartar a lâmina usada, procurar recipientes adequados para cortantes, evitando assim que pessoas possam se cortar.
- Não é recomendado a utilização da lâmina sem um cabo de bisturi, sob risco de erro na incisão ou de ferimento para o usuário.

**Validade:**

5 anos.

**Contraindicação:**

Não se aplica.

**Importado e Distribuído:**

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda  
Rua Padre Damasco, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

**CNPJ:** 01.005.728/0001-79**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40**SAC:** 0800 6658007**Resp. Técnica:** Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067**Fabricante:**

Sterilance Medical (Suzhou) INC.  
68, Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou 215134

