

A ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli informa que a instrução de uso a seguir se aplica para os seguintes modelos comerciais: EXF004060L, EXF004060LR e EXF0040120L.

EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTEAL FOTOSSENSÍVEL FORTECARE

Indicação de uso: Os extensores para infusão fotossensíveis da ForteCare são indicados para infusão gravitacional de soluções parenterais fotossensíveis.

Especificação:

Código interno	Descrição do Produto
EXF004060L	Extensor para infusão de 60 cm com ponta distal luer lock
EXF004060LR	Extensor para infusão de 60 cm com 3 french com ponta distal luer lock rotatório
EXF0040120L.	Extensor para infusão de 120 cm com ponta distal luer lock

Produto estéril, apirogênico e atóxico. **Esterilizado a gás óxido de etileno.**

Instruções de uso:

1. Verificar se o produto está dentro do prazo de validade e se a embalagem está íntegra.
2. Abrir a embalagem através de técnica asséptica.
3. Retirar as tampas protetoras e conectar uma extremidade no equipo e a outra no dispositivo de acesso ao paciente.
4. Verificar ausência de vazamentos.
5. Ao término da infusão, descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. DESTRUIR APÓS O USO.

- Somente utilizar se o produto estiver íntegro e dentro do prazo de validade.
- Use sempre técnica asséptica quando manusear o produto.
- Produto estéril, a menos que a embalagem esteja danificada ou tenha sido aberta.
- Após o uso, descartar de acordo com os regulamentos ambientais em vigor.

Prazo de validade: 36 meses se a embalagem estiver íntegra.

Armazenamento e transporte: Armazenar a temperaturas entre 5°C e 35°C, evitando a exposição direta à luz solar e à umidade elevada



Registro ANVISA: 80463910028

Fabricado por :
ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli
CNPJ: 08.474.646.0001/12
Travessa Pedro Pok, 570 - Rodovia BR 476, Km 18.
Colombo PR
Tel: (41) 3888 4460
Resp. Técnica: Christiane M. G. Hey
CRF-PR 211

