

**Cadastro / Registro M.S.:**

10369460168

**Modelos Cadastrados:**

Tamanhos: 19 G, 21 G, 23 G, 25 G e 27 G.

**Indicação de Uso:**

O DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SOLIDOR SCALPS é indicado para Infusão de fluídos e/ou soluções nutrição parenteral, administração de outras drogas, manter a correta hidratação e/ou desidratação em pacientes incapazes de administrar volumes suficientes de fluídos por via oral, nos processos de transfusão de sangue ou componentes sanguíneos ou coleta do mesmo. Ajuda no auxílio de conexões de seringas e equipamentos.

**Instrução de Uso:**

1. Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la em local adequado e condições assépticas de manipulação.
2. Selecionar o modelo e o tamanho apropriado do DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SOLIDOR SCALPS
3. Cuidadosamente, selecionar e limpar o local no paciente onde a veia será puncionada. A assepsia pode ser feita com qualquer solução germicida, álcool, polvidine, clorexidina, etc.
4. Interrupção momentânea da circulação, no local a ser puncionado, através do uso de um garrote. Este procedimento é feito para facilitar o acesso venoso.
5. Puncão do acesso com as técnicas adequadas, soltura do garrote.
6. Retirar a tampa rosqueada protetora, o dispositivo se encherá de sangue.
7. Ligar o dispositivo ao conjunto de infusão imediatamente após a retirada da proteção. Caso o procedimento seja para coleta de sangue, conectar a seringa e aspirar o sangue.
8. Fixar o dispositivo na pele do paciente.
9. Cobrir a área da puncionada com um curativo estéril.
10. Drogas podem ser injetadas intermitentemente com a ajuda de uma seringa através do orifício de injeção após a remoção da tampa protetora.
11. A tampa protetora do orifício da injeção deve permanecer fechado quando não estiver sendo usado.
12. Descartar o produto após a utilização única no lixo hospitalar conforme as normas vigentes da autoridade sanitária local.

**Conservação, Armazenamento e Transporte:**

- Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.
- Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o artigo deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem.
- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.
- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.
- O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado e familiarizado com os procedimentos utilizados na área médico hospitalar.

**Advertência/Precaução:**

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Não permitir o uso indevido bem como o mau uso do produto.
- Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem.

- Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro.
- Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. Recomenda-se então que o dispositivo seja descartado no lixo hospitalar.
- A esterilidade do artigo só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do artigo e este estiver dentro do prazo de validade.
- A tampa luer do dispositivo serve apenas como proteção até o momento da conexão a outro dispositivo. **Não serve como vedação.**
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados do maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- O produto deve ser utilizado uma só vez, não sendo permitido em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem individual.
- O produto deve ser utilizado de acordo com as instruções de uso.
- Os dispositivos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta.
- Os dispositivos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta.
- Os dispositivos não podem ser dobrados, redobrados, angulados, entalhados ou arranhados. Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.
- As orientações fornecidas objetivam assegurar que os artigos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio dos artigos. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, afim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao artigo.

#### Validade:

3 anos.

#### Contraindicação:

Não se aplica

#### Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

**CNPJ:** 01.005.728/0001-79

**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40

**SAC:** 0800 6658007

**Resp. Técnica:** Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

#### Fabricante:

Anhui Easyway Medical Supplies Co.,LTD

Nº.737 East Jianshe Road, Tianchang, Anhui Province, 239300/China

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso,165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525