

**AGULHA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES SEMI AUTOMÁTICA SAFER  
INSTRUÇÕES DE USO**

**INDICAÇÃO DE USO**

A Agulha para Biópsia de Tecidos Moles Semi-Automática Safer é indicada para diagnóstico qualitativo de lesões em tecidos moles, Diagnóstico pré-operatório de metástases linfonodais distantes em pacientes com tumor maligno e classificação de lesões ocupando não-espço, como mediastino e pulmão.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- O produto deve ser manipulado por profissional habilitado.
- O local de operação deve ser esterilizado estritamente antes do uso, e os componentes de configuração devem ser usados corretamente.
- Verificar embalagem e data de validade antes do uso. Depois de abrir o pacote, ele deve ser usado estritamente de acordo com a operação asséptica e procedimentos relacionados, e observar os sinais físicos do paciente.
- Tomografia computadorizada de tórax é realizada para medir o tamanho e a densidade da massa e a menor distância da linha reta à pele. Marque o local da punção na pele. Em seguida, realizar assepsia no local da punção. Após a anestesia, use uma agulha de biópsia descartável através da pele, tecido subcutâneo, músculos intercostais e tórax. A punção da membrana na massa pulmonar requer tomografias para ajustar a direção e a profundidade da agulha até que a ponta da agulha penetre na borda da massa, diga ao paciente para prender a respiração, movimente e retire a agulha rapidamente. Retire o tecido vivo. Depois que o tecido vivo foi removido, deve ser colocado em tubo apropriado conforme protocolo institucional.
- Após o procedimento, realizar a limpeza e desinfecção do ponto de punção ao mesmo tempo, a fim de evitar a infecção.
- Descarte todos os componentes em local adequado.
  
- Atenção deve ser dada ao processo de punção para evitar costelas, omoplatas, acessórios de vértebras e assim por diante, se a resistência for muito grande, não force a agulha, para evitar acidentes.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Produto de uso único, não reusar ou reesterilizar.

Proibido reprocessar.

Após abrir embalagem, o produto deve ser usado imediatamente. Descartar após o uso.



O produto é estéril a óxido de etileno. Antes do uso deve-se atentar para o acondicionamento dos indicadores de esterilização e prazo de validade da esterilização.

Não usar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

O uso deve ser estritamente com técnica asséptica, a fim de prevenir a infecção.

Observe que, se houver muita resistência no processo de punção, não force a agulha para evitar acidentes.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Pacientes em coma hepático, tendência de sangramento e terapia anticoagulante, infecção local, enfisema grave, fibrose pulmonar, ascite, cor pulmonar ou enfarte do miocárdio, lesões vasculares pulmonares, como fístula arteriovenosa, aneurisma. Hipertensão pulmonar, doença respiratória aguda, extensas áreas alveolares ou puncionadas com alvéolos, suspeita de doença cística pulmonar, sem condições de posicionamento ou pacientes que não cooperem.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANUSEIO**

Armazenar em local sem gás não corrosivo e em um ambiente bem ventilado com umidade relativa não superior a 80%.

Transportar em ambiente à prova de umidade, luz solar, infiltração chuva e de neve, alta temperatura, alta pressão e impacto.

O produto deve ser manipulado por profissional habilitado.

### **FABRICADO POR:**

Jiangsu Province Huaxing Medical Apparatus Industry Co.,Ltd.  
No.328, Tongda Road, Touqiao Town, Guangling District, City of Yangzhou, Jiangsu Province, China

### **IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:**

Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade Ltda  
Alameda África, 570 – Tambore – Santana de Parnaíba – SP  
Cep 06543.306                      Sac 0800.7701667  
Resp Técnica: Enfa Lucia Akemi Higa  
Reg MS: 10150470627