

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

1. Produto: Seringa Hipodérmica Estéril de uso único para uso manual - Sem Agulha.

2. Registro MS: 80026180002

3. Instruções de uso.

Conexão em seringa bico LUER LOCK:

- a) Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
- b) Destacar a unidade do produto da cartela;
- c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação.
- d) Retirar a seringa da embalagem pegando pela base do êmbolo;
- e) Retirar a agulha da embalagem pegando pela capa da agulha;
- f) Conectar a agulha, rosquear até que a agulha encontre resistência, sempre segurando pela capa da agulha. Se o Protetor / Dispositivo de Segurança. Não forçar após a resistência para não danificar a rosca da seringa.
- g) Se a agulha já estiver fixa, verificar se há resistência na conexão seringa / agulha;
- h) Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a escala zero da seringa, pressionar o êmbolo levemente simulando uma aplicação para ocorrer o destravamento da seringa.
- i) Retirar a capa da agulha;
- j) Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
- k) Após o uso descartar em local adequado para perfuro cortantes.

Conexão em seringa bico LUER SLIP:

- a) Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
- b) Destacar a unidade do produto da cartela;
- c) Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação.
- d) Retirar a seringa da embalagem pegando pela base do êmbolo;
- e) Retirar a agulha da embalagem pegando pela capa da agulha;
- f) Conectar a agulha e realizar o movimento de rotação 180° (½ volta), até que a agulha encontre resistência, sempre segurando pela capa da agulha.
- g) Se a agulha já estiver fixa, verificar se há resistência na conexão seringa / agulha;
- h) Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a escala zero da seringa, pressionar o êmbolo levemente simulando uma aplicação para ocorrer o destravamento da seringa.
- i) Retirar a capa da agulha;



Saldanha Rodrigues Ltda.

Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores – CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
E-mail: seringasr@seringasr.com.br

- j) Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
- k) Após o uso descartar em local adequado para perfuro cortantes.

4. Fabricante.

SALDANHA RODRIGUES LTDA	
Avenida Torquato Tapajós, nº 2475 – Bairro Flores	CEP: 69.058-830
CNPJ: 03.426.484/0001-23	Inscrição Estadual: 06.200.183-3
Inscrição SUFRAMA: 20068301-2	
E-mail: vendas@seringasr.com.br	
Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br	