

NOME DO PRODUTO: BOLSA PRESSÓRICA GCM MÉDICA

Registro MS: 10150470594

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: BOLSA PLÁSTICA

Matéria Prima: Nylon

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Método de Esterilização:

Validade: 5 anos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Bolsa Pressórica GC MÉDICA é uma bolsa pressurizadora constituída de um manguito que envolve a bolsa de infusão, quando inflado exerce uma pressão constante sobre a bolsa de soro, sangue ou outro líquido, para efetiva realização de infusão programada do líquido no paciente.

INDICAÇÃO DE USO

A Bolsa Pressórica é indicada para acelerar ou manter a velocidade de um determinado fluido à ser administrado de forma intravenosa em pacientes. Ou seja, é um produto destinado a exercer uma pressão sobre os frascos de soluções parenterais de grande volume ou bolsas de sangue (fluidos em bolsas de infusão), promovendo uma aceleração ou mantendo constante a infusão do fluido no paciente.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Abrir a embalagem;
2. Inserir a frasco da solução na bolsa pressurizadora;
3. Girar a válvula à direita e insuflar a bolsa pelo insuflador (pêra);
4. Para manter a bolsa pressurizada, manter a válvula para cima, ou seja, oposta ao insuflador;
5. Para despressurizar, girar a válvula sentido insuflador, se certificar que a bolsa esvaziou e após retirar o frasco;
6. Descartar a bolsa e o frasco em local adequado;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bolsa Pressórica 500ml (com indicação de pressão 150/250/300 mmHg)

Bolsa Pressórica 1000ml (com indicação de pressão 150/250/300 mmHg)

Matéria - prima da bolsa:

Bolsa - Nylon

Tubo - PVC

Indicador de pressão - ABS

Bulbo - Elastômero Termoplástico

Membrana transparente - Poliuretano termoplástico

Gancho - Poliestireno

Torneira de ar - Poliuretano Termoplástico

Plugue vedação - PVC

Conector de três vias - PVC

Válvula de três vias - Policarbonato

Filtro - Polietileno

Válvula uma via - Polietileno

Membrana Branca - Nylon

Botão de trava - Polietileno

FOTO



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
192401	BOLSA PRESSÓRICA 500 ML – GC MÉDICA
192402	BOLSA PRESSÓRICA 1000 ML – GC MÉDICA

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem individual em invólucro plástico tipo polybag e embaladas em caixa de papel.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser conservado em local de boa ventilação, limpo, escuro, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70% e sem nenhum gás corrosivo.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

1. O fabricante recomenda o uso único em um mesmo paciente a fim de evitar infecção cruzada.
2. Abra e use imediatamente. Descartar após o uso. Não usar se a embalagem externa estiver danificada.
3. Não usar se estiver fora do prazo de validade.
4. O produto deve ser armazenado em ambiente fresco, abrigado da luz solar. Não usar o dispositivo sem a orientação de um profissional qualificado;
5. Produto não estéril

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259