

Produto: Medix Brasil – Top Quality Luva para Procedimento Cirúrgico de látex natural, com pó.

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE:

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>As Luvas para Procedimento Cirúrgico Medix Brasil – Top Quality, com pó, foram desenvolvidas para a proteção dos pacientes e dos profissionais da saúde, em procedimentos não cirúrgicos.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>As Luvas para procedimentos cirúrgicos Medix Brasil, com pó, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada em 100% látex de borracha natural; ✓ Estéril (raio gama); ✓ Com pó bioabsorvível (amido de milho); ✓ Texturizada; ✓ Anatômica; ✓ Punho com bainha ✓ Espessura: 0,10mm (mínimo); ✓ Tamanhos: 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5; ✓ Comprimento mínimo: 260mm (6.0, 6.5) / 270mm (7.0, 7.5, 8.0) 280mm (8.5); ✓ Cor: Natural; ✓ Atóxica e apirogênica; ✓ Validade 3 anos após data de esterilização ✓ Descartável e de uso único
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 50 pares. Embalagem de transporte: caixa de papelão box, contendo 10 cartuchos.</p>

ORIENTAÇÕES DE USO	<p>Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas.</p> <p>Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.</p> <p>Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.</p> <p>Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.</p>
PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS	<p><i>“ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX”; “PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”</i></p> <p>Ler atentamente as Instruções de Uso;</p> <p>Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;</p> <p>Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;</p> <p>Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas;</p> <p>Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;</p> <p>Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;</p> <p>Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;</p>
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	<p>As Luvas de procedimento cirúrgico Medix Brasil, com pó, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

