



Loja virtual
www.biosani.net.br

Ficha Técnica de Equipos



Telefone

(43) 3557-4814
(43) 3557-6021
(43) 3557-6261



Contato

comercial@biosani.net.br
qualidade@biosani.net.br



Endereço

Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327
Distrito Industrial Hugo Parin, Arapoti-PR,
CEP: 84990-000, Insc. Estadual: 9030347851
CNPJ: 06.143.681/0001-23

2021

www.biosani.net.br



Extensor/ Perfusor para Equipos

Registro M.S: 8.02860.0.0042

Extensor Cristal

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

Constituído por 2 componentes básicos como polímeros: Tubo confeccionado em PVC atóxico (policloreto de vinila), na cor transparente (cristal ou cristal fosco) ou laranja, superfície lisa, paredes regulares e conector dos tipos Luer Slip e Luer Lock. Acessório: Corta Fluxo. O Extensor para equipos de uma via é compatível com bomba de infusão

DETALHAMENTO DOS COMPONENTES

Comprimento

- 10 cm 20 cm 40 cm 60 cm
- 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm
- 150 cm 180 cm 200 cm

Diâmetro externo

- 2,0~2,5 mm (6,0 FR) 4,1 mm (12,0 FR) Especial

Conectores macho e fêmea e componentes opcionais



Luer Slip



Protetor Luer Slip



Luer Lock



Protetor Luer Lock



Eliminador de ar



Luer Lock Reversível



Tampa Luer Lock Reversível



Pinça Roletel



Conector valvulado



Injetor Lateral



Luer Lock Fêmea



Tampa Luer Lock Fêmea



Corta Fluxo



Conector Escalonado com protetor



Ponta Perfurante com protetor

Material: Plástico injetado

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Embalagem primária: Papel Grau Cirúrgico – Papel Medical 60 g/m2 sem laca. Filme de Polipropileno mais Polietileno 0.08 mm.

Embalagem secundária: Caixa de papelão com onda simples cor parda.

Validade:

36 MESES

Extensor/ Perfusor para Equipos

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA O MANUSEIO DO PRODUTO

1. Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
2. Executar as conexões necessárias à finalidade a que se destina.
3. Descartar após o uso.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada.
- A conexão entre os componentes deve suportar as condições normais de uso do produto.
- O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.
- Verificar o prazo de validade do produto antes de sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.
- A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
- Produto de uso único estéril e apirogênico. Deve ser descartado após o uso.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Cores

- Cristal azul Cristal Laranja (âmbar)

Conector

Opcionais:

- Luer Slip Luer Lock Luer Lock Reversível Pinça Corta fluxo
 Eliminador de ar Conector valvulado Conector escalonado
 Válvula Anti Refluxo Injetor Lateral Ponta perfurante

**Registro: M.S.
Nº 8.02860.0.0042**



Extensor Fotossensível



Luer Slip
com Protetor



Luer Lock
com Protetor



Luer Lock com
Eliminador de Ar



Luer Lock Fêmea
com tampa Luer



Conector Escalonado
com protetor



Luer Lock Reversível
com protetor