

NOME DO PRODUTO: FILTRO EPIDURAL – PORTEX

Registro MS: 80228990107

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Filtro

Matéria Prima: Membrana Hidrofóbica

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Projetado para filtração em linha, para doses de volume baixo de soluções aquosas, o filtro liso propicia conforto ao paciente e é especialmente apropriado para a filtração de soluções medicamentosas durante a injeção no espaço epidural, para ajudar proteger o paciente contra infecções.

Seu modelo é adequado à correta fixação à pele do paciente, importante quando a administração do medicamento é contínua, para conforto do paciente.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado na filtração “em linha” de soluções aquosas;
É especialmente utilizado para filtração de drogas e soluções durante a injeção no espaço epidural protegendo o paciente contra infecções.

INSTRUÇÃO DE USO

- Conectar o filtro à seringa e ao cateter;
- Observar o volume de preenchimento para que o líquido não extravase.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Filtro hidrofílico de 0,2 μ micras;

Ponta distal com conector do tipo luer lock macho para que possa ser conectado ao cateter;

Ponta proximal com conector do tipo luer lock fêmea para que possa ser conectado à seringa, o que é especialmente importante durante a movimentação do paciente;

O volume de preenchimento é de cerca de 0,8 ml (prime);

Apropriado para 96 horas de uso.

Pressão máxima: 792kPa

Área do filtro 5,25cm²

Recomenda-se o uso do filtro com seringa com capacidade mínima de 10ml, para evitar pressões indesejadas

FOTO



*** Produto isento de Látex**

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

100.386.010

Filtro Epidural tipo "Plano"

**APR
ESE****INDICAÇÃO COMERCIAL****FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno.

Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e limpo, em temperatura máxima de estocagem de 40°C;

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Quando colocar ou retirar um filtro epidural do conector epidural, segure a extremidade Luer do conector. O cateter deve estar completamente introduzido no conector para evitar oclusão. Verifique se há ar no espaço entre o filtro e o sistema de injeção, qualquer bolha de ar fará um bloqueio que impedirá a passagem do líquido.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259