

Produto: Medix Brasil – Equipo de Infusão Gravitacional Completo

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável

## Ficha Técnica

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>IMAGEM DO PRODUTO</b></p>       |  <p>The image shows the Medix Brasil infusion set components, including a clear plastic tube with a blue connector, a white drip chamber, and a white roller clamp. Next to it is the product packaging, which is a white blister pack with the Medix logo and detailed instructions in Portuguese.</p>  |
| <p><b>DESCRIÇÃO</b></p>               | <p>Equipos de infusão gravitacional macro gotas (20 gotas/ml) ou micro gotas (60 gotas/ml) Medix Brasil, com conector Luer Slip, ponta perfurante com tampa protetora, abertura de ventilação de ar, câmara de gotejamento flexível, filtro de solução, regulador de fluxo, injetor lateral.</p>   |
| <p><b>INDICAÇÃO DE USO</b></p>        | <p>Os Equipos de infusão gravitacional Medix Brasil, foram desenvolvidos para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.<br/>Possui a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venosos periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação).</p>  |
| <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricados em polietileno, polipropileno e Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS).</li> <li>✓ Estérel</li> <li>✓ Somente para infusão por gravidade</li> <li>✓ Ponta perfurante com tampa protetora</li> <li>✓ Tubo flexível de 150cm</li> <li>✓ Abertura para ventilação de ar com filtro (membrana hidrófoba e bacteriológica)</li> <li>✓ Injetor lateral tipo Y com membrana auto cicatrizante</li> <li>✓ Pinça rolete reguladora de fluxo</li> <li>✓ Câmara gotejadora flexível com filtro de partículas 15µ antibacteriano</li> <li>✓ Conector macho (lock) fêmea (slip) com tampa protetora</li> <li>✓ Possui DEHP</li> <li>✓ Látex free</li> <li>✓ Certificado de Conformidade INMETRO</li> <li>✓ Validade 5 anos após data de esterilização</li> <li>✓ Descartável e de uso único</li> <li>✓ Atóxico e apirogênico</li> </ul> |
| <p><b>APRESENTAÇÃO</b></p>            | <p>Embalagem principal: blister em papel grau cirúrgico ou polybag com 01 unidade.<br/>Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 400 unidades.<br/>Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 500 unidades.</p>   |
| <p><b>ORIENTAÇÕES DE USO</b></p>      | <p>Verificar o tipo adequado, conforme indicação na embalagem; Verificar a integridade da embalagem e retirar o Equipo da embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso; Executar o procedimento; Após o uso, descartar o equipo imediatamente em local para materiais contaminados;</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>PRECAUÇÕES,<br/>RESTRICÇÕES,<br/>ADVERTÊNCIAS E<br/>CUIDADOS ESPECIAIS</b> | <p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”</i></p> <p><b>Ler atentamente as Instruções de Uso;</b><br/>Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;<br/>Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;<br/>Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;</p>   |
| <b>ARMAZENAMENTO E<br/>TRANSPORTE</b>   | Os equipos de infusão gravitacional Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte. |

**Importador:**

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 [sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

**Responsabilidade Técnica:**

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

**Redes Sociais:**

[www.medixbrasil.com.br](http://www.medixbrasil.com.br)



medixbrasil