

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

CLINIGEL

Descrição:

CliniGel é um produto utilizado para preencher o espaço entre o aparelho e a pele do paciente para que não exista ar, possibilitando que o aparelho transmita condutividade sônica e elétrica.

Indicação do produto:

Gel para uso sobre a pele (uso tópico) como meio de contato para transmissão ultrassônica em ultrassonografia diagnóstica, ecógrafos, dopplers e similares, em procedimentos de fisioterapia, TENS e FES e como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos em eletrocardiografia, desfibriladores e similares.

Composição:

Água Deionizada
Polímero Carboxivinílico
Isotiazolinonas
Glicerina Bi-Destilada USP
Monoisopropanolamina
E.D.T.A. Sal Dissódico
Sulfato de Cobre 5H₂O.

Precauções: restrições, advertências e cuidados de conservação:

Produto de uso externo, não ingerir. Em caso de irritação suspender o uso, em contato com os olhos lave-os abundantemente com água corrente.

O produto é atóxico, hipoalergênico e possui pH adequado ao uso na pele. Porém, caso ocorra sensibilização ou irritação na pele do profissional ou do paciente o uso deverá ser suspenso e o motivo deverá ser investigado.

Poderá ocorrer incômodo durante o uso do produto se a pele não estiver íntegra.

A manipulação do produto CliniGel não requer utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's).

Instrução de Uso:

Deve ser aplicado sobre a pele na área a ser examinada ou tratada ou diretamente no transdutor.

Cuidados de Armazenamento e Transporte:

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, em local seco e limpo.

O produto deverá ser transportado em temperatura ambiente e sobre pallets.

Contra Indicações:

Contra indicado para profissionais ou pacientes que conhecidamente possuem reações indesejadas, como sensibilização, irritação e/ou alergia a algum(ns) componente(s) que constituem a composição do produto. Não deve ser utilizado em pele não íntegra.

Resp. Técnico: Nivia Freitas do Nascimento

CRF N ° 26042

Fabricado por:

Multigel Ind. Com. Imp. e Exp. de Produtos para Saúde Ltda - EPP
Rua Francisco Andrade, 111, Faixa Verde, Silvianópolis – 37560-000 – MG
CNPJ nº 49.604.226/0001-90

Registro ANVISA nº:

REPRESENTANTE LEGAL
Valmir Castillo Sanches

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nivia Freitas do Nascimento
CRF/MG 26042