



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S.A.

BALÃO DE REINALAÇÃO ADVANTIVE

REGISTRO ANVISA 10296900081

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Com as mãos devidamente higienizadas, inspecione o Balão de Reinalação Advantive se não apresenta alterações aparência, como mudança de coloração ou manchas e/ou peças quebradas e que esteja limpo e desinfectado / esterilizado,
- 2- Assegure-se de que o balão selecionado é do tamanho apropriado;
- 3 - Colocar a máscara de anestesia na boca do paciente.
- 4 - Conectar o Balão de Reinalação Advantive ao conjunto do aparelho de anestesia seguindo a orientação do fabricante do aparelho.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo hospitalar de pronto uso - Fabricante recomenda uso único

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados;

Os Balões de Reinalação Advantive em látex free são fornecidos não esterilizados, portanto, o produto só suporta a desinfecção pela técnica Oxido de Etileno, seguir os protocolos da instituição.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

