

## **Punch para Biópsia- KAI**

Registro MS: 10150470563

### **DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Instrumento para Biópsia

Nome Comercial: Punch para biópsia KAI

Matéria Prima: Lâmina em aço inoxidável AISI 304 e cabo em Polipropileno

Método de Esterilização: Raio Gama

Produto Estéril: Sim

Validade: 05 Anos

### **FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO**

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Punch para Biópsia Kai destina-se à incisão transitória na superfície do corpo para obter amostras de tecido para teste, através do corte de sua lâmina cilíndrica.

### **INDICAÇÃO DE USO**

Punch para Biópsia Kai destina-se à incisão transitória na superfície do corpo para obter amostras de tecido para teste.

### **INSTRUÇÃO DE USO**


1. Selecionar o tamanho adequado de Punch a ser utilizado.
2. Abrir a embalagem em condições assépticas e retirar o punch.
3. O local da biópsia já deve ter sido desinfetado adequadamente.
4. Aplicar anestesia local onde a pele será removida.

5. Esticar a pele utilizando os dedos polegar e indicador. A punção será realizada entre os dois dedos.
6. Fazer a incisão onde a pele deve ser retirada fazendo um movimento de rotação no sentido horário e anti-horário, aplicando uma leve pressão sobre a pele para permitir a penetração do instrumento no tecido. A pele perfurada vai se levantar acima do nível da pele ao redor.
7. Após a profundidade desejada ser atingida, remover o Punch para biópsia.
8. Remover o tecido cuidadosamente com pinça estéril e suturar a lesão.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A lamina tem 7mm de comprimento e o cabo 96mm.

#### FOTO

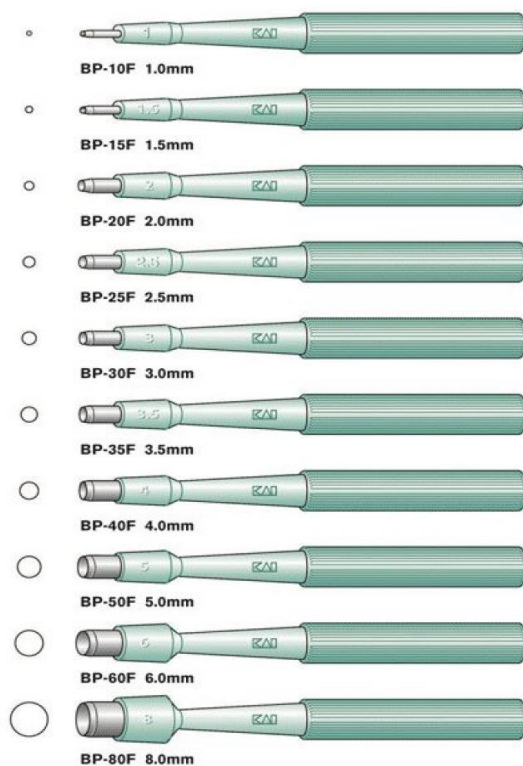

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
BP-20F	PUNCH P/BIOPSIA 2MM
BP-30F	PUNCH P/BIOPSIA 3MM
BP-40F	PUNCH P/BIOPSIA 4MM
BP-50F	PUNCH P/BIOPSIA 5MM
BP-80F	PUNCH P/BIOPSIA 8MM

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Caixa com 20 unidades

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Evitar a exposição a temperaturas excessivamente altas, alta umidade, luz solar direta e água. Armazenar em temperatura ambiente e local limpo e seco. Evitar o armazenamento junto de produtos químicos.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

O fabricante recomenda que o produto não seja reutilizado. Selecione a lamina adequada de acordo com o procedimento a ser realizado.

Não use se a embalagem estiver violada ou o produto fora do prazo de validade.

Use imediatamente após a abertura da embalagem.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cirurgicafernandes.com.br](http://www.cirurgicafernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259