



## ELETRODO DESCARTÁVEL VITALCOR

**REGISTRO ANVISA** 10296900046

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Abrir o pacote somente antes da utilização.
- 2) Verifique se os eletrodos não estão danificados, caso estejam não os utilize.
- 3) Conecte o cabo de conexão do aparelho com o eletrodo.
- 4) Remova a capa protetora do eletrodo.
- 5) Coloque o eletrodo no paciente, na posição indicada no aparelho de leitura, pressionando o anel de suporte do eletrodo em movimentos circulares firmemente na pele.
- 6) A pele deve estar limpa e seca e o excesso de pelos devem ser removidos.
- 7) Feche o pacote com os eletrodos não utilizadas, dobrando-o duas vezes e fixe a ponta com um clipe.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Acondicionados em sua embalagem original terão validade por 30 dias após a abertura, e se em outro recipiente, validade de 15 dias.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Leia as instruções antes de usar.

Não deve ser reprocessado e reaproveitado sob hipótese nenhuma devido a perda de funcionalidade e integridade caso venha a ser esterilizado.

Respeitar o prazo de validade

Não utilizar sobre a pele lesionada e/ou ferida.

Não aplicar sobre extremidades óssea ou articulações

## ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

## IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - [www.joamed.com.br](http://www.joamed.com.br)

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

## IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

