



INFUSOR MULTIVIAS VITALGOLD

REGISTRO ANVISA 10296900162

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem de forma asséptica.
2. Retirar o infusor da embalagem protetora.
3. Fechar as pinças clamp.
4. Retirar a tampa protetora e conectar o infusor no cateter ou escalpe venoso.
5. Em caso de infusão simultânea, conectar as linhas venosas nos conectores e abrir as pinças clamp.
6. Regular o fluxo conforme a prescrição médica.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Lave bem as mãos e utilize luva descartável.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Abrir a embalagem de forma asséptica

Artigo médico-hospitalar de uso único.

Destruir após a sua utilização.

Ler as instruções antes de usar.

Não deverá ser reprocessado ou reaproveitado sob hipótese alguma.

Respeitar sempre o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.

O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

O manuseio do produto deverá ser feito exclusivamente por profissionais devidamente habilitado

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.



ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33
Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br
Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

