

INSTRUÇÕES DE USO – FLEXBAND

- O local de aplicação deve estar limpo e seco
- Posicionar a parte do corpo a ser aplicada a bandagem em uma posição confortável e com alinhamento anatômico normal, assim reduz possíveis deformações e lesões;
- Colocar as bandagens firmemente para evitar que escorreguem durante a movimentação do paciente;
- Ao enfaixar as extremidades, colocar a bandagem firmemente, com igual tensão exercida sobre cada volta. Este procedimento evita a distribuição desigual de pressão sobre a parte do corpo enfaixada evitando o comprometimento circulatório;
- Evitar o excesso de superposição de camadas de bandagens.

Obs: A fricção entre a bandagem e a pele pode provocar rupturas na pele.

Fabricante:

Nanjing 3H Medical Products CO., LTD.

No. 5Zhushan Road, Gaochun Economic Development Zone 211300 Nanjing, Jiangsu Province, China

Importador:

Casco e Campos Comércio de Produtos Esportivos Ltda. CNPJ 05.935.018/0001-07.

Avenida Miruna, 560 e 566, São Paulo/SP CEP 04084-002

Registro ANVISA: 80676130050

Responsável Técnico: Schely Camila Lopes CREFITO3: 108048-F