

## INSTRUÇÃO DE USO

### 1) NOME COMERCIAL

Bolsa Térmica Quente e Fria

### 2) DESCRIÇÃO

A BOLSA TÉRMICA QUENTE E FRIA é uma bolsa composta de gel não tóxico para facilitar a aplicação de terapia de frio ou calor, pois mantém a temperatura por mais tempo que a água. A função primária é aquecer ou resfriar o local desejado, conforme a necessidade. Proporciona alívio para processos inflamatórios, lesões musculares, febres, cólicas, hematomas e torcicolos. Não congela mesmo estando constantemente no freezer. Seu aquecimento pode ser feito através de banho-maria ou microondas.

### 3) INDICAÇÃO DE USO

Indicada para tratamento coadjuvante dos processos dolorosos em geral, como implantodontia, periodontia, processos hemorrágicos, tratamentos cirúrgicos, processos inflamatórios e traumáticos.

### 4) APRESENTAÇÃO

Embalagem com 10 bolsas.

### 5) COMPOSIÇÃO

Água purificada, espessante e conservante.

### 6) MODO DE USO

#### COMPRESSA FRIA

Colocar a bolsa térmica no freezer ou congelador até que se obtenha um completo resfriamento do gel, por um período de aproximadamente 2 a 4 horas.

#### COMPRESSA QUENTE

Colocar a bolsa térmica em imersão por 2 a 3 minutos em água fervente. Para uso em micro-ondas utilizar um recipiente adequado com água, aquecendo por 1 minuto. O tempo de aquecimento pode variar dependendo das características de cada microondas.

### 7) ADVERTÊNCIA

Após a preparação envolver a bolsa em uma toalha fina para evitar o contato direto com a pele e o desconforto inicial do frio ou do calor

### 8) PRECAUÇÃO

Após a preparação envolver a bolsa em uma toalha fina para evitar o contato direto com a pele e o desconforto inicial do frio ou do calor.

Crianças podem utilizar sob a supervisão de um adulto.

Produto atóxico, mas não deve ser ingerido.

Não deixar ao alcance de crianças e animais domésticos.

Manusear com cuidado para evitar furar ou rasgar a embalagem.

### 10) CONTRAINDICAÇÃO

Não se aplica.

### 11) EFEITO ADVERSO

Não se aplica.

**12) CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em temperatura ambiente, em geladeira ou freezer.

**13) PRAZO DE VALIDADE**

Após aberto e conservado nas recomendações do fabricante a validade do produto mantém-se estável por 02 anos após a data de fabricação.

**14) MODO DE DESCARTE**

Descartar o produto conforme a legislação local.

**15) DIZERES LEGAIS**

Maquira Indústria de Produtos Odontológico S.A.  
End: Av. Melvin Jones 773 Pq. Industrial Bandeirantes  
Maringá - Paraná - CEP: 87070-030

Responsável Técnico: Kellen Dib de Campos  
CRF-PR 15.807  
Reg. ANVISA: 80322409010

**16) SIMBOLOGIA**