



**FARMATEX DO BRASIL S/A.**

CNPJ: 21.284.068/0001-10 - Inscrição Estadual: 9068178611

Rua: Doutor Egon Armando Krueger, 189-B - Cidade Industrial

CEP: 81350-020 – Curitiba – PR – Fone/Fax: 41 30787760

**Produto:** EQUIPO FARMATEX

**Registro Anvisa:** 81175930011

**Origem:** CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Modelo Produto Médico:**

02LSMA MACROGOTAS COM FILTRO ENTRADA DE AR E INJETOR LATERAL CONECTOR LUER SLIP

04LSMA SIMPLES MACROGOTAS COM FILTRO CONECTOR LUER SLIP

04SLMI SIMPLES MICROGOTAS, COM FILTRO CONECTOR LUER SLIP

08LSMI MICROGOTAS COM FILTRO ENTRADA DE AR E INJETOR LATERAL CONECTOR LUER SLIP

**INSTRUÇÕES DE USO**

- 1- ABRA A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA UTILIZANDO AS ABAS DISPOSTAS ACIMA DA INSCRIÇÃO "ABRA AQUI";
- 2- RETIRE O EQUIPO DA EMBALAGEM E FECHÉ COMPLETAMENTE A ROLDANA DA PINÇA CORTA FLUXO;
- 3- REMOVA O PROTETOR DA PONTA PERFURANTE E INSIRA NO FRASCO DA SOLUÇÃO A SER INFUNDIDA;
- 4- POSICIONE O FRASCO PARA BAIXO, ABRA A ROLDANA DA PINÇA CORTA FLUXO E PREENCHA A EXTENSAO DO EQUIPO COM A SOLUÇÃO;
- 5- FECHÉ A ROLDANA E RETIRE A TAMPA DO CONECTOR LUER CONECTANDO-O AO DISPOSITIVO DO ACESSO VENOSO;
- 6- VERIFIQUE A PERFUSÃO DO ACESSO E LIBERE O FLUXO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO.