

NOME DO PRODUTO: AGULHA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA – YESOMED

Registro MS: 10150470422

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Agulhas descartáveis

Matéria Prima: Aço Inox

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Agulha descartável, para uso exclusivo na aspiração de medicamentos, possui ponta romba, afim de evitar acidente com o profissional da área de saúde, atendendo a NR32.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para aspiração, transferência, e irrigação de substâncias líquidas.

INSTRUÇÃO DE USO

Verifique a integridade da embalagem do produto antes do uso;

- Abra a embalagem pelas pétalas até expor o canhão;
- Para adaptar a agulha, conecte o bico da seringa no canhão exposto e gire no sentido horário;
- O protetor plástico serve para manter a agulha protegida até o uso, retire-o com cuidado;

- Segure a seringa em posição vertical e retire a tampa plástica da agulha;
- Introduza lentamente a agulha na ampola ou frasco ampola num ângulo de 90° e aspire a medição;
- Descarte em seguida em coletor de materiais perfurante e/ ou cortantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICO

Componente	Matéria Prima
Capas protetoras	Polipropileno (PP)
Canhão da agulha	Polipropileno (PP)
Cânula Tubular da Agulha	Aço inox de uso médico

Tamanho:

25 X 1.2 (18G X 1")

Cor: Vermelho**FOTO**

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENT O	DIÂMETRO
CF019-001	Agulha para Aspiração Romba (1" x 18G) Caixa com 100 unidades	25 mm	1.2 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem unitária em papel grau cirúrgico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser conservado em ambiente seco e arejado.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Não utilizar se a embalagem estiver violada

Produto de uso único, proibido reprocessar.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259