

**NOME DO PRODUTO: PLUG ADAPTADOR COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE**

Registro MS: 10150470557

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Adaptadores

Matéria Prima: ABS e borracha de Polisopreno.

Produto Estéril: (X) Sim ( ) Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 Anos

**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo anexado a conjuntos de infusão / transfusão para adicionar medicamentos, realizar salinizações, e após o uso mantém barreira de fechamento evitando contato com o meio externo.

**INDICAÇÃO DE USO**

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo indicado para o uso em conjuntos de infusão/ transfusão e cateteres intravenosos periféricos e centrais que se destinam à manutenção da permeabilidade da infusão intravenosa.

## INSTRUÇÃO DE USO

- Abra a embalagem de forma asséptica.
- Certifique-se de que a tampa não toque a superfície externa da embalagem.
- Realize antissepsia na ponta do dispositivo a ser utilizado e conecte o adaptador. Quando conectar gire cerca de 2-3 vezes até que a conexão esteja firme o suficiente.
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição;

Nota: Realizar antissepsia na ponta do dispositivo antes e depois do uso.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Comprimento:** 17.8 ±0.4mm

**Diâmetro Ø:** 10.3 ±0.3mm

**Conexão:** Luer

### FOTO



### Tampa Luer com **Membrana**

Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica,  
**MANTENDO O SISTEMA FECHADO.**

**LIVRE DE LÁTEX**

**ESTÉRIL**



CAIXA COM  
**100**  
UNIDADES

\* Produto isento de Látex.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
GC6029T02	Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é fornecido esterilizado a óxido de etileno, embalado unitariamente em blister flexível de polietileno e papel grau cirúrgico em caixas contendo 100 unidades.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, escuro, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70% e sem nenhum gás corrosivo.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- - Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

**DISTRIBUIDO POR:**

ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA  
Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR  
CNPJ: 25.239.410/0001-10  
SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509  
Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)  
E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)  
Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051  
REG MAPA: PR 001306-4