

NOME DO PRODUTO: ESTILETE PARA INTRODUÇÃO DE SONDAS ENDOTRAQUEAIS – WELL LEAD

Registro MS: 10150470324

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Guia

Matéria Prima: Vareta de alumínio e revestimento de PVC (Cloro de Polivinila)

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Guia Para Introdução de Sondas Endotraqueais Well Lead é destinado para facilitar a intubação oral da traqueia, utilizado em conjunto com o tubo endotraqueal.

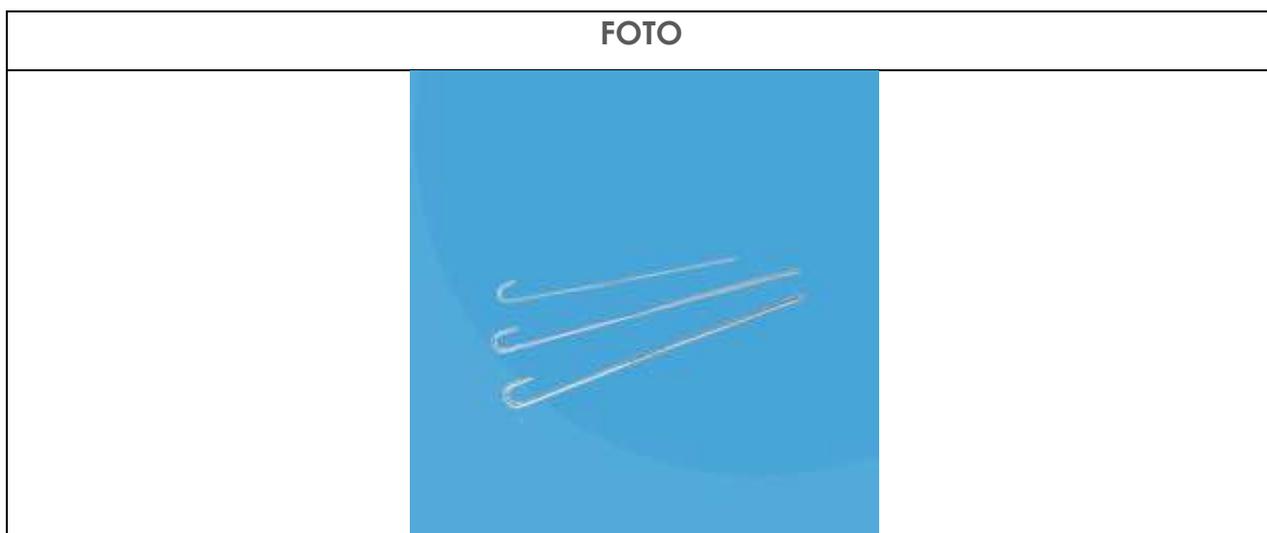
Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de PVC.

INDICAÇÃO DE USO

O Guia Para Introdução de Sondas Endotraqueais Well Lead deve ser usado em combinação com o tubo endotraqueal permitindo que a tubo seja modelado antes da utilização, fornecendo um auxílio positivo para intubação oral da traqueia.

INSTRUÇÃO DE USO

- Verificar a numeração adequada para o procedimento;
- Abrir a embalagem com técnica asséptica;
- Lubrificar o estilete com gel hidrossolúvel e introduzir no lumen da sonda endotraqueal;
- Adequar ao formato da cânula;
- Realizar o procedimento da intubação;
- Ao término retirar o estilete;
- Descartar em local apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Produto isento de Látex

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SONDA	COMPR
261.10.600	Guia de Intubação 6 Fr	2,5 a 5,5 mm	272 mm
261.11.000	Guia de Intubação 10 Fr	4,0 a 7,5 mm	346 mm
261.11.400	Guia de Intubação 14 Fr	5,5 a 10,0 mm	365 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno. Caixa com 10 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, arejado e abrigado da luz solar.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Atenção na lubrificação do estilete: o uso excessivo do lubrificante pode obstruir o lumen interno da sonda;
- Estéril a menos que a embalagem esteja aberta ou danificada;
- Não usar se a embalagem estiver danificada;
- Usar imediatamente após abrir a embalagem;
- Descartar após o uso.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259