

**NOME DO PRODUTO: CATETER CÂNULA NASAL DE OXIGÊNIO TIPO
ÓCULOS – FOYOMED**

Registro MS: 10150470500

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Circuitos Respiratórios

Matéria Prima: PVC

Método de Esterilização:

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O cateter cânula nasal de oxigênio tipo óculos – FOYOMED é produzido em 100% PVC maleável e PRONG em PVC macio e atraumático.

Estéril.

INDICAÇÃO DE USO

O Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos Foyomed é indicado para auxiliar no adequado fornecimento de oxigênio para o paciente, diminuindo o trabalho da respiração e reduzindo o estresse sobre o miocárdio. O oxigênio é fornecido diretamente nas fossas nasais para suprir os déficits de oxigênio tissular.

INSTRUÇÃO DE USO

- Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente.
- Abrir a embalagem do produto de maneira asséptica
- Adaptar o cateter nas narinas do paciente ajustando o tubo na parte posterior das orelhas para que elas possam servir de apoio.
- Conectar a cânula nasal ao tubo de oxigênio / extensor.
- Conectar o fluxômetro e regular o fluxo de oxigênio conforme a orientação médica.
- Descartar o material após o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto isento de LÁTEX. Contém DEHP.



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO DA EXTENSÃO	DIAMETRO DO PRONG
LB141321	Cateter Cânula Nasal de Oxigênio Tipo Oculos - Foyomed	Neonatal	2 metros	4FR
LB141322	Cateter Cânula Nasal de Oxigênio Tipo Oculos - Foyomed	Pediatrico	2 metros	6FR
LB141323	Cateter Cânula Nasal de Oxigênio Tipo Oculos - Foyomed	Infantil	2 metros	9FR
LB141324	Cateter Cânula Nasal de Oxigênio Tipo Oculos - Foyomed	Adulto	2 metros	12FR
LB141214	Cateter Cânula Nasal de Oxigênio Tipo Oculos - Foyomed	Adulto	1,40 metros	12FR

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente invólucro de Polietileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Produto de uso único, o reuso pode ocasionar infecção cruzada.
- Descartar após o uso.
- Proibido reprocessar.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.
- Armazenar o produto em ambiente seco e arejado.
- Garantir que todas as conexões estejam seguras e o ar circule livremente através do tubo.
- Contém DEHP, use com cuidado em crianças e mulheres grávidas. Se sentir mal, pare de usar e procure o médico.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259