

Cadastro / Registro M.S.:

10369460188

Modelos cadastrados:

18 G, 19 G, 20 G, 21 G, 22G, 23G, 24G, 25G, 27G,

Indicação de Uso:

O scalp para coleta de sangue à vácuo é utilizado na coleta de amostras de sangue destinadas a laboratório de análises clínicas.

Instrução de uso:

1. Antes do uso, verificar a integridade da embalagem e prazo de validade.
2. Desinfetar o local de punção, retirar a tampa protetora da agulha para realizar a punção intravenosa.
3. Após visualizar o sangue, inserir a agulha e o conjunto dentro do plug de borracha do tubo de coleta de sangue a vácuo; quando o sangue começar a fluir dentro do tubo, soltar o garrote.
4. Se houver necessidade de coletar sangue em mais que um tubo, extrair a agulha do plug de borracha e colocar os demais tubos.
5. Ao terminar, extrair a agulha intravenosa e em seguida a agulha "spike", descartar em local apropriado.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

Transportar e armazenar a temperatura ambiente e em local fresco e seco.

Descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados cortantes.

Advertência/Precaução:

Não utilizar o produto se a sua embalagem estiver danificada.

Proibido reprocessar.

Validade:

5 Anos

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua padre damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante: Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.

N. 39, South Shengli Road, Jinxian County – Nanchang City – Jiangxi Province.

