

Máscara de Cirúrgica Tripla Descarpack



DADOS TÉCNICOS

- Composta de camadas de não tecido polipropileno;
- Possuem camada tripla, soldadas eletronicamente por ultrassom;
- A camada intermediária da Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack atua como elemento filtrante, oferecendo proteção contra microrganismos;
- Possui clipe nasal e 3 pregas horizontais possibilitando ajuste adequado e seguro à face;
- Embaladas em cartuchos de papelão ou pacotes plásticos contendo 50 unidades;
- A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack é indicada para proteção usuário contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias, minimizando tanto a contaminação do ambiente, quanto do usuário.

MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Cor
Elásticos	Branca
Tiras	Branca

INSTRUÇÕES DE USO

1. Retirar a máscara da embalagem original;
2. Colocar a máscara sobre o rosto;
3. Amarar as tiras ou ajustar o elástico atrás das orelhas;
4. Ajustar o clipe nasal da máscara ao nariz;
5. Após o uso, descartar em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada;
- Não modificar a máscara;
- Produto não estéril;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Fabricante recomenda uso único.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não são informados métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de recomendação de uso único. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente identificado como resíduo infectante (grupo A1 de acordo com a RDC 222/2018) na cor branca e devidamente identificado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Xiantao Fushi Protective Products Co., Ltda.

Notificação Anvisa: 10330660215

Responsável Técnica: Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269